

FONENDO M.WAITCH TIPO LITT**DESCRIPCIÓN:**

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.

CLASIFICACIÓN:

Según **R.D. 1591/2009**: Producto Sanitario, de **Clase I**.

CARACTERÍSTICAS:

- **CAMPANA** doble, ligera, de aluminio.
- **TUBO** de PVC, flexible, disponible en distintos colores.
- **OLIVAS** de PVC blanco.
- **ARCO** metálico enfundado en el tubo.

INDICACIONES:

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.

MODO DE USO:**CAMPANA:**

- Para baja frecuencia posicione la campana encima el punto de auscultación.
- Para alta frecuencia; posicione la membrana sobre el punto de auscultación.

PRECAUCIONES:

- Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas.
- No poner en contacto con aceites o disolventes.
- No sumergir el fonendo en líquidos.
- No esterilizar en autoclave.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN:

- Las olivas se sacan desenroscándolas.
- Para sacar el diafragma, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol.
- Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.
- Antes de ensamblar de nuevo las distintas parte séquelas concienzudamente.



PRESENTACIÓN:

1 unidad en caja de cartón, exceptuando el modelo c/estuche que se presenta en una caja en sky.



CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN
 8 426828 015187	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" CN. 159550.8 AMARILLO	 8 470001 595515	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" CN. 159551.5 ROJO
 8 470001 595522	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" CN. 159552.2 AZUL	 8 470001 595492	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" CN. 159549.2 VERDE
 8 470001 595461	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" CN. 159546.1 NEGRO	 8 426828 876122	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" ROSA
 8 426828 876115	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" GRIS	 8 426828 015101	FONENDO T/LITT "MEDICAL WAITCH" C/ESTUCHE

