



## **HUMIDIFICADOR SUPERFLEMING**

### **VAPOR FRÍO MOD. 6109**

**C.N: 151526.1**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Humidificador de vapor frío, que funciona por vibraciones de alta frecuencia, no perceptibles por el oído humano (ultrasonidos), por lo que es muy silencioso. Una adecuada humedad ambiental ayuda a mantener las funciones protectoras naturales de la mucosa nasal y de las vías respiratorias.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Capacidad de humidificación: 180 mL/h.
- Capacidad del depósito: 2,4 L aproximadamente.
- Peso: 1,7 Kg.
- Tamaño:
  - ❖ Altura: 200 mm.
  - ❖ Anchura: 200 mm.
  - ❖ Profundidad: 200 mm.
- Tensión: 230 V.
- Consumo: 30 W – 50 Hz.
- La nebulización en frío evita el riesgo de quemaduras.

#### **INDICACIONES:**

Evitar el exceso de sequedad ambiental.

#### **MODO DE USO:**

- Compruebe que el equipo esté completamente limpio, que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición O (off) y que el cable de alimentación no esté conectado a la red eléctrica.
- Retire el depósito de agua y quite el tapón situado debajo.
- Llene el tanque de agua con agua fría, y luego vuelva a apretar el tapón firmemente.
- Coloque el depósito de agua en la cámara de nebulización.
- Coloque el equipo en el lugar deseado.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que sea fácilmente accesible.
- Encienda el equipo, colocando el interruptor en la posición de encendido.





- Cuando el equipo se enciende, y durante el uso, la luz es de color verde. Cuando el recipiente de agua está vacío, la luz se vuelve roja.
- Ajuste el surtidor de vapor en la dirección deseada.
- Siempre apague el equipo y desconéctelo de la red eléctrica cuando no lo utilice.

### **PRECAUCIONES:**

- Usar solo agua potable, limpia y fría.
- Colocar el humidificador sobre una superficie lisa, plana y estable.
- No exponer a la luz solar directa y colocarlo lejos de fuentes de calor.
- No dirigir el flujo de vapor hacia muebles, televisores o aparatos eléctricos.
- No utilizar agua caliente.
- No obstruir la rejilla de ventilación de la base del aparato.

### **CONSERVACIÓN:**

- Antes de limpiar el equipo, apague siempre el humidificador y desconecte el enchufe de la toma de corriente para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- Se recomienda enjuagar las siguientes piezas con agua fría antes de utilizar el humidificador: transductor, tanque de agua y surtidor de vapor.
- Limpie y seque el humidificador al final de cada ciclo de funcionamiento.
- Limpie el humidificador antes de usar si no se ha utilizado durante mucho tiempo.

### **PRESENTACIÓN:**

1 unidad en caja.



8 470001 515261



**VARI**SPORT 

Fleming Comercial, S.A.  
Pol. Can Calderón - Avda. Marina, 56 A  
08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona  
Telf.: 934 902 946 - Fax: 934 900 096  
[www.fleming-sa.com](http://www.fleming-sa.com) - [fleming-sa@fleming-sa.com](mailto:fleming-sa@fleming-sa.com)

**Uri-Con**

**ALP K2**

**MEDICAL**  
**WATCH**