

BRAGA DE INCONTINENCIA FLEMING CERRADA**DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Braga protectora de material impermeable, con goma elástica para ajustarse al paciente.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
3105004	-	4	45-60	8426828050041
3105006	335810.1	6	60-75	8426828050065
3105008	335802.6	8	75-90	8426828050089
3105010	335794.4	10	90-100	8426828050102
3105012	335786.9	12	100-115	8426828050126

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Impedir el derrame de la orina en las diferentes incontinencias.

CARACTERÍSTICAS

- Composición:
 - Plástico 100% PVC perfumado
 - Elástico cintura (látex free): 64% poliéster y 36% lycra
 - Elástico piernas (látex free): 68% poliéster, 20% lycra y 12% poliamida-6
- Color: blanco.
- Diferentes tallas disponibles: 4, 6, 8, 10, 12

MODO DE USO

- Al ser una braga cerrada, se pone como una braga normal.
- Puede colocarse un apósito absorbente.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- Escoger la talla adecuada.



- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano (preferiblemente) o a máquina con jabón neutro y en agua fría o tibia.
- No usar lejía.
- Secar sin retorcer ni estirar.
- Dejar secar alejadas de fuentes de calor.
- Almacenar en lugar seco y fresco.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.

**CE**