

CABESTRILLO FLEMING MALLA

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Cabestrillo clásico, de malla transpirable con cinta regulable, bilateral, en color azul.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	TALLA	MEDIDA CM	EAN13
2650861	354837.3	P	38x19	8470003548373
2650862	354845.8	M	41x20	8470003548458
2650863	354852.6	G	45x21	8470003548526

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Para la sujeción del brazo, evitar la inflamación, favorecer el descanso, tratar una fractura y ayudar a la descarga del brazo y hombro.
- Utilizado en casos de inmovilización post-quirúrgica, traumatismos, luxaciones, fracturas... como soporte para mantener el brazo en posición correcta
- El brazo puede ir vendado o enyesado, pero no es necesario para poder usar el cabestrillo.
- Se puede utilizar también para la recuperación tras la implantación de un marcapasos, para recordar que no hay que utilizar el brazo. Pueden ser útiles después de sufrir un ACV para ayudar en el proceso de volver a aprender a caminar.

CARACTERÍSTICAS

- Composición: 100% poliéster.
- Tejido transpirable tipo malla
- Cierre: hebilla, permite regulación de largura

MODO DE USO

- Escoger la talla adecuada.
- Introducir el brazo en la bolsa, de forma que la mano salga por la apertura.
- Pasar la cinta por detrás de la cabeza a modo de bandolera e introducir el resorte en la ranura y apretar hasta oír "clec".
- Ajustar la cinta por medio de la hebilla.



- Si el cabestrillo es demasiado pequeño o el brazo no está en la posición correcta, la muñeca y la mano sobresaldrán del manguito.
- El codo debe formar un ángulo de 90º y el brazo debe colgar cómodamente cuando se encuentre de pie.

PRECAUCIONES

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.
- Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas.
- Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo de cabestrillo.
- Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover los dedos con regularidad para favorecer la circulación.
- Comprobar a diario la piel de debajo del cabestrillo, en especial la axila, para asegurar que se mantiene en buen estado.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

CONSERVACIÓN

- Lavar en agua templada y jabón neutro.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Presentación unitaria en caja de cartón.

**CE**