

COLECTOR URI-CON APOSIT

(con tira apósito, adhesiva a 2 caras)

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Colector para la incontinencia masculina, con forma anatómica para su adaptación al pene.

Con abertura en terminal, para poder acoplarlo a la bolsa de recogida de orina.

Con tira apósito hipoalérgica, adhesiva a 2 caras, para ajustar entre el colector y el pene y evitar su desplazamiento

REF. INTERNA	C.N.	TALLA	PERÍMETRO	UNIDADES	EAN13
3101725	465898.9	P – 25	7.85 CM	30 (financiado S.N.S.)	8470004658989
3101730	465906.1	M – 30	9.42 CM	30 (financiado S.N.S.)	8470004659061
3101735	465914.6	G – 35	10.99 CM	30 (financiado S.N.S.)	8470004659146
3101825	-	P – 25	7.85 CM	50 (no financiado)	8426828018256
3101830	-	M – 30	9.42 CM	50 (no financiado)	8426828018300
3101835	-	G – 35	10.99 CM	50 (no financiado)	8426828018355

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Los colectores son usados para la adaptación de las bolsas de recogida de orina, en los casos de incontinencia masculina.

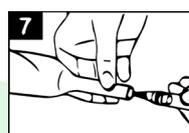
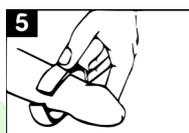
CARACTERÍSTICAS

- Colector: De látex natural. Partes del colector:
 - Adaptador al pene.
 - Cazoleta.
 - Tubo conector, a la bolsa recogida de orina.
- Tira apósito, adhesiva a 2 caras. Compuesta por:
 - Papel siliconado.
 - Hidrocoloide.
 - Adhesivo hipoalérgico de acrilato de grado médico.



MODO DE USO

- 1. Recortar el vello púbico si es necesario.
- 2. Limpiar y secar la zona alrededor del pene.
- 3. Abrir el envase con cuidado de no dañar el adaptador. No utilizar elementos cortantes.
- 4. Retirar el papel protector de ambos lados de la tira-apósito adhesiva.
- 5. Colocar la tira adhesiva hidrocoloide alrededor del cuerpo del pene para una mayor superficie de adhesión, a 1 cm del glande.
- 6. Desenrollar la funda de látex a lo largo del pene, tal y como muestra el gráfico, hasta su raíz y comprobar que queda bien adherida a la cinta que se ha colocado previamente. Presionar ligeramente para comprobar que esté bien adherido.
- 7. Ajustar el extremo conector del adaptador URI-CON al tubo de la bolsa colectora de orina.
- 8. Para su cambio/renovación bastará con enrollar el colector hacia la cabeza del pene y la tira adhesiva se desprenderá con él.

**PRECAUCIONES**

- Para un solo uso diario. La reutilización del URI-CON podría comportar riesgo de infección e irritación.
- Contiene látex.
- No usar con lubricantes de base oleaginosa.
- No utilizar sobre heridas abiertas.
- No apretar la tira en exceso.
- Para su cambio/renovación bastará con enrollar el colector hacia la cabeza del pene y la tira adhesiva se desprenderá con él.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto inmediatamente y consulte con el médico.
- Escoger la talla adecuada según el diámetro del pene, y no según su perímetro.

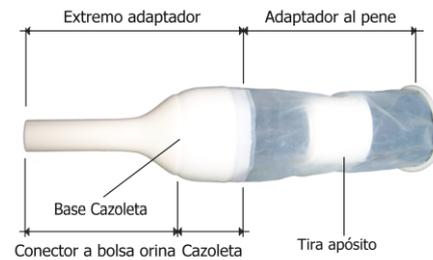
CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.



PRESENTACIÓN

- En caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S.
- En caja de 50 unidades (presentación hospitalaria).



fleming

