

FAJA CON REFUERZO TRANSPIRABLE VARISPORT

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja de fuerte compresión, con doble cinturón para sujetar la zona sacro-lumbar. Lleva 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción. Tejido transpirable.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	COLOR	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2242015	380055.6	BEIGE	S	70-90	8470003800556
2242016	380154.6	BEIGE	M	80-100	8470003801546
2242017	380451.6	BEIGE	L	90-110	8470003804516
2242018	381459.1	BEIGE	XL	100-120	8470003814591
2242019	-	BEIGE	XXL	110-130	8426828872179

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Para aliviar lumbalgias en fase aguda o crónica.
- Ciática.
- Artrosis.
- Sujeción en problemas vertebrales.

CARACTERÍSTICAS

- Velcros garantizados para 2000 usos.
- Cinta agarradera en el cinturón para facilitar la compresión al ajustar la faja.
- Composición:
 - 10% poliamida
 - 64% poliéster
 - 26% látex
- Color: beige, bordado verde.
- Lleva 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción.



MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor de la zona lumbar de forma que se abroche por delante.
- Para facilitar la colocación de la faja dispone de dos tiradores, uno en cada lado.
- La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada, ajustando de forma adecuada.
- Cerrar el doble cinturón sin apretar en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua fría o templada y jabón neutro.
- Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja.

**CE**