

FAJA CONTENCIÓN FLEMING 3 BANDAS

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica de 3 bandas, cosidas entre sí con cosido elástico FAGOTY, para ajustar al abdomen. Las bandas han sido revestidas interiormente de hilatura afelpada. El cierre velcro permite una sujeción en distintas posiciones y por tanto, una regulación de la compresión.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2202301	BLANCO	385856.4	1	70-90	8470003858564
2202302	BLANCO	385880.9	2	90-110	8470003858809
2202303	BLANCO	385914.1	3	110-130	847000385914
2202304	BLANCO	379016.1	4	130-150	8470003790161
2202305	BLANCO	-	5 ESP.	145-160	8426828871103
2202306	BLANCO	-	6 ESP.	160-175	8426828872865
2434301	BEIGE	-	1	70-90	8426828876290
2434302	BEIGE	-	2	90-110	8426828876306
2434303	BEIGE	-	3	110-130	8426828876313
2434304	BEIGE	-	4	130-150	8426828876320
2434305	BEIGE	-	5 ESP.	145-160	8426828876375

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Contusiones torácico- abdominales.
- Contención post-operatoria abdominal.
- Contención post-parto.
- Hernias ventrales.
- Lesiones musculares abdominales.
- Ewentraciones abdominales post-operatorias.

CARACTERÍSTICAS

- Color: blanco y beige.
- Composición:



- Cierre velcro: 100% Poliamida.
- Bandas: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastán 10%.
- Cierre garantizado para 2000 usos.

MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor del abdomen de forma que las bandas queden en la espalda y el cierre en la parte delantera.
- La tira velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al lado izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar de forma adecuada, procurando que no presione en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

CONSERVACIÓN

- Mantener el cierre velcro cerrado durante el lavado.
- Lavar a mano, en agua templada como máximo 30°C. con jabón neutro.
- Secar sobre una superficie plana y alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja con colgador.

