

## FAJA CONTENCIÓN FLEMING 4 BANDAS

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica de 4 bandas, cosidas entre sí con cosido elástico FAGOTY, para ajustar al abdomen. Las bandas han sido revestidas interiormente de hilatura afelpada. El cierre velcro permite una sujeción en distintas posiciones y por tanto, una regulación de la compresión.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2202401	BLANCO	384321.8	1	70-90	8470003843218
2202402	BLANCO	385047.6	2	90-110	8470003850476
2202403	BLANCO	385054.4	3	110-130	8470003850544
2202404	BLANCO	378968.4	4	130-150	8470003789684
2202405	BLANCO	-	5 ESP.	145-160	8426828871035
2202406	BLANCO	-	6 ESP.	160-175	8426828873350
2444401	BEIGE	-	1	70-90	8426828876337
2444402	BEIGE	-	2	90-110	8426828876344
2444403	BEIGE	-	3	110-130	8426828876351
2444404	BEIGE	-	4	130-150	8426828876368

### CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

### INDICACIONES

- Contusiones torácico- abdominales.
- Contención post-operatoria abdominal.
- Contención post-parto.
- Hernias ventrales.
- Lesiones musculares abdominales.
- Eventraciones abdominales post-operatorias.

### CARACTERÍSTICAS

- Color: blanco y beige.
- Composición:
  - Cierre velcro: 100% Poliamida.



- Bandas: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastán 10%.
- Cierre garantizado para 2000 usos.

### MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor del abdomen de forma que las bandas queden en la espalda y el cierre en la parte delantera.
- La tira velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al lado izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar de forma adecuada, procurando que no presione en exceso.

### PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

### CONSERVACIÓN

- Mantener el cierre velcro cerrado durante el lavado.
- Lavar a mano, en agua templada como máximo 30°C. con jabón neutro.
- Secar sobre una superficie plana y alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No planchar.

### PRESENTACIÓN

Unidad en caja con colgador.

**CE**