

FAJA SACROLUMBAR PREVENTIVA VARISPORT**DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Faja de fuerte compresión, para sujetar la zona sacrolumbar.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2242996	BEIGE	-	S	80-100	8426828872797
2242997	BEIGE	381210.8	M	90-110	8426828429977
2242998	BEIGE	381228.3	L	100-120	8426828429984
2242999	BEIGE	-	XL	110-130	8426828872803
2243000	BEIGE	-	XXL	120-140	8426828872810

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para lumbalgias en fase aguda o crónica, ciática, artrosis, sujeción en problemas vertebrales o como preventivo en trabajos o situaciones que requieran forzar excesivamente la zona lumbar.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido transpirable.
- Composición:
 - 31% poliamida
 - 26% poliéster
 - 9% algodón
 - 34% látex recubierto
- Cierre velcro, garantizado para 2000 usos.
- Lleva 5 varillas de material rígido, para una mayor sujeción.
- Color: beige.
- Altura: 25cm.

MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor de la zona lumbar de forma que se abroche por delante.



- La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar el cinturón, ejerciendo la compresión adecuada, procurando que la faja no presione en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua templada y jabón neutro.
- Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja.



CE

