

INMOVILIZADOR DE HOMBRO FLEMING MALLA

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Vendaje transpirable en forma de bolsa, regulable en altura, que mantiene el brazo sujeto y el hombro inmovilizado mediante una cinta ajustable a la cintura.

REFERENCIA INTERNA	TALLA	MEDIDAS CM	EAN13
7341079	P	38x19	8426828410791
7341080	M	41x20	8426828410807
7341081	G	45x21	8426828410814

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Estabilización e inmovilización del hombro en casos de traumatismos, luxaciones, fracturas, post-cirugía...
- Para la sujeción y soporte del brazo afectado en posición correcta, evitar la inflamación, favorecer el descanso, tratar una fractura y ayudar a la descarga del brazo y hombro.

CARACTERÍSTICAS

- Composición:
 - Cuerpo de malla: poliéster 100% (transpirable)
 - Ribete: poliéster 100%.
 - Cinta: poliéster 100%.
 - Hebilla: plástico 100%.
- Color: Azul

MODO DE USO

- Escoger la talla adecuada.
- Colocar el brazo en la bolsa del inmovilizador, de tal manera que la mano salga por el lateral abierto.
- Pasar la cinta por detrás del cuello, a modo de bandolera.
- Ajustar la cinta adecuadamente por medio de la hebilla.



- Sujetar la bolsa del inmovilizador con la cinta inferior, por detrás de la cintura, con el cierre velcro y ajustar adecuadamente.

PRECAUCIONES

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- El cuello humeral debe quedar convenientemente apoyado.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.
- Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas.
- Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo del inmovilizador.
- Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover los dedos con regularidad para favorecer la circulación.
- Comprobar a diario la piel de debajo del inmovilizador, en especial la axila, para asegurar que se mantiene en buen estado.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano o a máquina en agua fría o templada y con jabón neutro.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.

PRESENTACIÓN

Se presenta en una caja unitaria.

