

**SUSPENSORIOS FLEMING****DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Vendaje en forma de bolsa con el que se sostiene el escroto y su contenido, en las afecciones testiculares, epididimarias o del cordón espermático.

REF. INTERNA	C.N.	TALLA	LARGO BOLSA	ANCHO BOLSA	EAN13
3104841	200741.3	1	10.60	10	8470002007413
3104842	200758.1	2	11.25	10.50	8470002007581
3104843	200766.6	3	12	11	8470002007666
3104844	200774.1	4	12.75	11.50	8470002007741
3104845	200782.6	5	13.75	12	8470002007826
3104846	200790.1	6	14.50	13	8470002007901
3104847	200808.3	7	15	13.50	8470002008083
3104848	200816.8	8	15.75	14	8470002008168
3104849	200824.3	9	16.50	15	8470002008243
3104850	200832.8	10	17.75	15.75	8470002008328
3104851	200840.3	11	18.50	16.75	8470002008403
3104852	200857.1	12	19.50	17.25	8470002008571

**CLASIFICACIÓN**

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

**INDICACIONES**

Suspensión del escroto y su contenido en las afecciones testiculares.

- Como medio preventivo de las afecciones testiculares, epidermitis, orquitis, etc.
- Inflamaciones en post-operatorio de hernias, varicocele, vasectomías.

**CARACTERÍSTICAS**

- Composición:
  - Pieza central: algodón 100%.
  - Bolsa de sujeción testicular: 90% algodón, 10% poliéster.
  - Cierre (cinturón) con hebilla de plástico (nylon) ajustable.
  - Cintura elástica: 40% lycra, 60% poliéster.



- Bajo-nalgas con ojal: 40% lycra, 60% poliéster.
- Tejido transpirable
- Color: blanco.
- Largo del cinturón hasta la T/6: 88cm aprox.
- Largo del cinturón hasta la T/12: 91cm aprox.

### MODO DE USO

- El cinturón debe colocarse al nivel de las ingles, no de cintura.
- Pasar el pene a través del orificio que hay entre la rejilla y el cinturón.
- Acomodar los testículos en la bolsa de rejilla.
- Ajustar y sujetar las cintas elásticas bajo-nalga al cinturón, mediante los botones.

### PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

### CONSERVACIÓN

- Lavar a mano o a máquina, a una temperatura máxima de 30°C.
- No usar lejía.

### PRESENTACIÓN

Se presenta en caja unitaria.

