



### TIRA ADHESIVA A 1 CARA URI-CON

#### **DESCRIPCIÓN:**

Tira adhesiva a 1 cara.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Papel siliconado a 2 caras.
- Espuma de poliéster.
- Adhesivo de acrilato.

#### **INDICACIONES:**

Para la sujeción de los colectores para bolsas de recogida de orina.

#### **MODO DE USO:**

1. Colóquese el URI-CON sobre la cabeza del pene, de manera que quede un espacio de 1 cm, entre la cabeza del pene y la base de la cazoleta del colector.
2. Despegar el papel de la tira adhesiva.
3. Colocar la tira encima del URI-CON, en forma de espiral, comenzando por el dorso de la cabeza del pene.
4. Asegurarse de que la tira está bien colocada y de que no apriete en exceso.
5. Ajuste el URI-CON al conector del tubo de la bolsa de orina.

#### **PRECAUCIONES:**

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- No apretar la tira en exceso.
- No desechar en el ambiente.

#### **CONSERVACIÓN:**

Guardar en lugar seco y alejado de fuentes de calor.

#### **PRESENTACIÓN:**

Disponible en cajas de 30 y 50 unidades.

Caja de 30 unidades



8 426828 010113

Caja de 50 unidades



8 426828 010120

