

## CABESTRILLO FLEMING VELOUR

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Vendaje en forma de bolsa acolchado, con la que se sostiene el brazo.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	TALLA	EAN13
2650864	381129.3	ÚNICA	8470003811293

### CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

### INDICACIONES

- Para la sujeción del brazo, evitar la inflamación, favorecer el descanso, tratar una fractura y mantener el brazo afectado en su posición. Mantiene el brazo en posición correcta y favorece la descarga del brazo y hombro.
- El brazo puede ir vendado o enyesado, pero no es necesario para poder usar el cabestrillo.
- Se utiliza también para la recuperación tras la implantación de un marcapasos, para recordar que no hay que utilizar el brazo.
- Además, son útiles después de sufrir un ACV para ayudar en el proceso de volver a aprender a caminar.

### CARACTERÍSTICAS

- Composición:
  - Cuerpo: velour de poliamida 100%.
  - Ribete: poliéster 100%
  - Cinta: velour de poliamida 100%.
  - Hebilla: plástico 100%.
  - Cierre de contacto: poliéster 100%.
- Talla: Única.
- Bilateral
- Color: Beige o Azul



Dimensiones:

	CUERPO		CINTA SUPERIOR	
	LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO
TALLA ÚNICA	44 cm	14,5 cm	100 cm	5 cm

### MODO DE USO

- Poner el brazo en la bolsa, de manera que la mano salga por el lateral abierto y pasar la cinta por detrás del cuello, a modo bandolera.
- Ajustar la cinta adecuadamente por medio de la hebilla y el velcro.
- Sujetar la bolsa con el cierre de contacto.
- El codo debe formar un ángulo de 90° y el brazo debe colgar cómodamente cuando se encuentre de pie.

### PRECAUCIONES

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.
- El cuello humeral tiene que quedar convenientemente apoyado.
- Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas.
- Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo de cabestrillo.
- Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover los dedos con regularidad para favorecer la circulación.
- Comprobar a diario la piel de debajo del cabestrillo, en especial la axila, para asegurar que se mantiene en buen estado.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

### CONSERVACIÓN

- Puede lavarse en lavadora, teniendo la precaución de cerrar los velcros.
- Lavar en agua templada y jabón neutro.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.
- No planchar.



## PRESENTACIÓN

Se presenta en una caja unitaria.



CE

# fleming

