

## CABESTRILLO HEMIPLÉJICO BÁSICO FLEMING

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Cabestrillo compuesto por dos bases que se sitúan en el brazo y van sujetas con una cinta que va al cuello.

REFERENCIA INTERNA	TALLA	EAN13
2650868	ÚNICA	8426828508689

### CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

### INDICACIONES

Para la sujeción del brazo:

- Reduce la subluxación gleno-humeral.
- Ayuda a evitar dolores de espalda y pseudo-distrofia.

### CARACTERÍSTICAS

- Composición:
  - Base y cintas de espuma-velour: poliamida 100%
  - Ribete: poliéster 100%
  - Hebillas de plástico.
- Partes del cabestrillo:
  - Dos bases por donde poner el brazo.
  - 1 cinta superior con hebilla.
  - Cinta que une las hebillas.
- Talla única.

### MODO DE USO

- Introducir el brazo por las dos bases y poner la cinta alrededor del cuello.
- Ajustar el tamaño de la cinta regulando la hebilla situada en la base de mayor tamaño.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.



**PRECAUCIONES**

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- Antes de colocar definitivamente, comprobar que las tiras tengan la medida correcta.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.
- El cuello humeral tiene que quedar convenientemente apoyado.
- Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas.
- Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo de cabestrillo.
- Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover los dedos con regularidad para favorecer la circulación.
- Comprobar a diario la piel de debajo del cabestrillo, en especial la axila, para asegurar que se mantiene en buen estado.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

**CONSERVACIÓN**

- Lavar a mano o a máquina en agua fría o templada y con jabón neutro.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.
- No planchar.

**PRESENTACIÓN**

Se presenta en una caja unitaria.

**CE**