

**BOLSA ORINA FLEMING 2 LITROS****DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Bolsa para la recogida de orina, de cama, con capacidad mínima de 2000 c.c. y tubo de 90 cm.

| REFERENCIA INTERNA | C.N.     | TUBO  | FORMATO | EAN13         |
|--------------------|----------|-------|---------|---------------|
| 3103230            | 494294.1 | 90 cm | 30 uds  | 8470004942941 |
| 3103231            | -        | 90 cm | 250 uds | 8426828032313 |

**CLASIFICACIÓN**

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

**INDICACIONES**

Las bolsas de recogida de orina, son productos sanitarios, usados como recipiente donde queda remansada y almacenada la orina procedente de un colector o de una sonda vesical, aplicada al enfermo.

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 2000 c.c. (+/-20%).
- Bolsa recogida: Fabricada con 2 láminas de PVC, transparente lechoso, soldadas por alta frecuencia.
  - La bolsa lleva en sus extremos superiores, hendiduras que permiten el acoplamiento de un colgador, para su fijación a la cama.
  - En la parte anterior de la bolsa está impresa una escala en c.c., de valor aproximado.
- Tubo: De PVC transparente de 90 cm (+/-3 cm.) de longitud total, soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia, para garantizar su perfecta adhesión. La luz interior del tubo es de 5 mm.
- Conector: De granza de PVC blanco, soldado al final del tubo y con un diámetro interior de 5 mm. para fijación a sonda o colector.
- Capuchón: De polietileno de baja densidad, de color azul, para protección del conector.
- No contiene látex.



**CADUCIDAD**

5 años.

**MODO DE USO**

- Abrir el envase con precaución para no dañar el producto
- Conectar firmemente la bolsa a la sonda o colector, por medio de la boquilla situada al extremo del tubo de la bolsa.
- Asegurar que la válvula de vaciado está cerrada (según modelo). Acoplar la bolsa, por las hendiduras de los extremos superiores al colgador de plástico incluido y colgar la bolsa en la cama.
- La bolsa debe ser siempre colgada de un soporte, situándola por debajo del nivel de la vejiga urinaria para evitar reflujo.
- Evitar aplastar, pinzar o colapsar el tubo durante la utilización del producto para no interrumpir el flujo de orina hacia la bolsa.

**PRECAUCIONES**

- Para un solo uso diario. La reutilización de la bolsa podría comportar riesgo de infección.
- No utilizar como instrumento de medición.
- Se debe sustituir la bolsa antes de alcanzar el nivel máximo.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- Vaciar el contenido de la bolsa en el retrete antes de su desecho.
- No desechar en el ambiente. Tirar directamente a la basura.

**CONSERVACIÓN**

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.



### PRESENTACIÓN

- Unidad de venta: caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S. (Se incluye 1 colgador).
- Embalaje: caja con 12 cajas de 30 unidades.
- Presentación hospitalaria: caja de 250 unidades.

Caja de 30 unidades:



Embalaje: 12 cajas de 30 unidades:



fleming

CE

