

**COLECTOR URI-CON TIRA ADHESIVA 1 CARA****DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Colector para la incontinencia masculina, con forma anatómica para su adaptación al pene.  
Con abertura en terminal, para poder acoplarlo a la bolsa de recogida de orina.  
Con tira adhesiva a 1 cara, para ajustar el colector y evitar su desplazamiento

| REF. INTERNA | C.N.     | TALLA  | PERÍMETRO | UNIDADES               | EAN13         |
|--------------|----------|--------|-----------|------------------------|---------------|
| 3101025      | 471599.6 | P – 25 | 7.85 CM   | 30 (financiado S.N.S.) | 8470004715996 |
| 3101030      | 471607.8 | M – 30 | 9.42 CM   | 30 (financiado S.N.S.) | 8470004716078 |
| 3101035      | 450189.6 | G – 35 | 10.99 CM  | 30 (financiado S.N.S.) | 8470004501896 |
| 3101125      | -        | P – 25 | 7.85 CM   | 50 (no financiado)     | 8426828011257 |
| 3101130      | -        | M – 30 | 9.42 CM   | 50 (no financiado)     | 8426828011301 |
| 3101135      | -        | G – 35 | 10.99 CM  | 50 (no financiado)     | 8426828011356 |

**CLASIFICACIÓN**

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

**INDICACIONES**

Los colectores son usados para la adaptación de las bolsas de recogida de orina, en los casos de incontinencia masculina.

**CARACTERÍSTICAS**

- Colector: De látex natural. Partes del colector:
  - Adaptador al pene.
  - Cazoleta.
  - Tubo conector, a la bolsa recogida de orina.
- Tira apósito, adhesiva a 1 cara. Compuesta por:
  - Papel siliconado.
  - Espuma.
  - Adhesivo de acrilato.



**MODO DE USO**

- 1. Recortar el vello púbico si es necesario.
- 2. Limpiar y secar la zona alrededor del pene.
- 3. Colocar el adaptador URI-CON sobre la cabeza del pene, de manera que por dentro quede un espacio de poco más de 1cm entre la cabeza del pene y el URI-CON.
- 4. Desenrollar el adaptador de látex a lo largo del pene, hasta su raíz, para permitir la correcta colocación de la tira de espuma adhesiva.
- 5. Despegar el papel protector de la tira de espuma adhesiva y colocar la tira por su parte adhesiva, y en espiral, alrededor del adaptador, comenzando por el dorso de la cabeza del pene, de forma que éste no quede demasiado apretado.
- 6. Ajustar el extremo conector del adaptador URI-CON al tubo de la bolsa colectora de orina.
- 7. Para su cambio/renovación bastará con enrollar el colector hacia la cabeza del pene y la tira adhesiva se desprenderá con él.

**PRECAUCIONES**

- Para un solo uso diario. La reutilización del URI-CON podría comportar riesgo de infección e irritación.
- Contiene látex.
- No usar con lubricantes de base oleaginosa.
- No utilizar sobre heridas abiertas.
- No apretar la tira en exceso.
- Para su cambio/renovación bastará con enrollar el colector hacia la cabeza del pene y la tira adhesiva se desprenderá con él.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto inmediatamente y consulte con el médico.
- Escoger la talla adecuada según el diámetro del pene, y no según su perímetro.


**CONSERVACIÓN**

Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.



PRESENTACIÓN

- En caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S.
- En caja de 50 unidades (presentación hospitalaria).

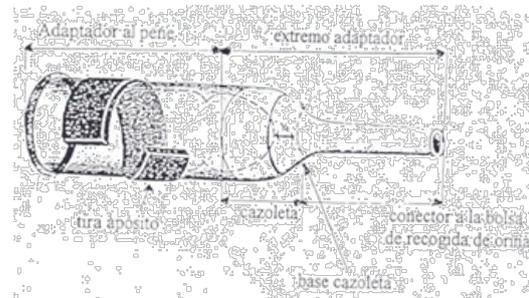

fleming <sup>CE</sup>

