

COLLARÍN CERVICAL FLEMING ANATÓMICO ESPUMA BLANDO

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Collar anatómico acolchado, de espuma blanda, color blanco/crudo.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	TALLA	ALTURA CM	LARGO CM
2370017	171970.6	S	9	40
2370018	171971.3	M	9	44
2370019	171972.0	L	9	49
2370020	171973.7	XL	9	54
2370016	-	XXL	9	59

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para la inmovilización del cuello respecto al tronco, sujetando las vértebras cervicales. Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios).

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo: espuma.
- Funda: algodón.
- Cierre: velcro.
- Libre de látex.
- Diferentes tallas disponibles.
- Color: blanco/crudo.
- Forma anatómica, para mayor comodidad.

MODO DE USO

- Colocar el collarín alrededor del cuello de tal manera que el cierre velcro quede en la nuca.
- Ajustar debidamente con el cierre velcro.
- No apretar en exceso.



PRECAUCIONES

- Sólo usar bajo prescripción facultativa.
- No poner en contacto directo con heridas abiertas.
- Asegurarse de que la talla es la adecuada.
- Producto inflamable.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua templada y jabón neutro. En ningún caso utilizar lejía ni lavar en seco.
- Secar el collarín, extendido, sin exponerlo a los rayos solares, ni fuentes de calor.
- Guardar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria de plástico con colgador.

**CE**