

COLLARÍN CERVICAL FLEMING ANATÓMICO PHILADELPHIA

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Collar anatómico rígido.

REFERENCIA INTERNA	TALLA	PERÍMETRO CUELLO
2370039	S	25 – 31 cm
2370040	M	32 – 38 cm
2370041	L	39 – 48 cm

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para la inmovilización del cuello respecto al tronco, sujetando las vértebras cervicales. Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios).

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo: plastazote de 12 mm de espesor, con perforaciones.
- Refuerzos: anterior y posterior de termo plástico.
- Doble cierre: velcro.
- Libre de látex.
- Diferentes tallas disponibles.
- Color carne

MODO DE USO

- Colocar el collarín alrededor del cuello de tal manera que el cierre velcro quede en la nuca.
- Ajustar debidamente con el cierre velcro.
- No apretar en exceso.



PRECAUCIONES

- Sólo usar bajo prescripción facultativa.
- No poner en contacto directo con heridas abiertas.
- Asegurarse de que la talla es la adecuada.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua templada y jabón neutro. En ningún caso utilizar lejía ni lavar en seco.
- Secar el collarín, extendido, sin exponerlo a los rayos solares, ni fuentes de calor.
- Guardar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria de plástico.

**CE**