

FAJA CONTENCIÓN FLEMING 2 BANDAS

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica de 2 bandas, cosidas entre sí con cosido elástico FAGOTY, para ajustar al abdomen. Las bandas han sido revestidas interiormente de hilatura afelpada. El cierre velcro permite una sujeción en distintas posiciones y por tanto, una regulación de la compresión.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	ALTURA FAJA	EAN13
2202201	BLANCO	385955.4	1	70-90	16 cm	8470003859554
2202202	BLANCO	386672.9	2	90-110	16 cm	8470003866729
2202203	BLANCO	387753.4	3	110-130	16 cm	8470003877534
2202204	BLANCO	379057.4	4	130-150	16 cm	8470003790574
2202205	BLANCO	-	5 ESP.	145-160	16 cm	8426828877297
2424201	BEIGE	-	1	70-90	16 cm	8426828876252
2424202	BEIGE	-	2	90-110	16 cm	8426828876269
2424203	BEIGE	-	3	110-130	16 cm	8426828876276
2424204	BEIGE	-	4	130-150	16 cm	8426828876283

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Fracturas costales.
- Contusiones abdominales.
- Lesiones musculares abdominales.

CARACTERÍSTICAS

- Color: blanco y beige.
- Composición:
 - Cierre velcro: 100% Poliamida.
 - Bandas: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastán 10%.
- Cierre garantizado para 2000 usos.



MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor del abdomen de forma que las bandas queden en la espalda y el cierre en la parte delantera.
- La tira velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al lado izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar de forma adecuada, procurando que no presione en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

CONSERVACIÓN

- Mantener el cierre velcro cerrado durante el lavado.
- Lavar a mano, en agua templada como máximo 30°C. con jabón neutro.
- Secar sobre una superficie plana y alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja de cartón con orificio para colgar.



CE

