

FAJA LABORAL TRANSPIRABLE VARISPORT

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja de fuerte compresión, con cinturón regulador de compresión. Se adjuntan tirantes, opcionales, que se acoplan a la faja mediante velcro. Lleva 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2242986	NEGRO	348896.9	S	70-90	8470003488969
2242987	NEGRO	348995.9	M	80-100	8470003489959
2242988	NEGRO	349001.6	L	90-110	8470003490016
2242989	NEGRO	349035.1	XL	100-120	8470003490351

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para todas las actividades o situaciones en que la zona lumbar precise de una sujeción adicional, como la realización de esfuerzos laborales como levantar pesos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Color negro.
- Composición:
 - 20% elastano.
 - 80% poliamida.
- Cierre velcro garantizado para 2000 usos.
- Cinta agarradera en el cinturón para facilitar la compresión al ajustar la faja.
- Tirantes opcionales.
- Altura trasera 23cm.
- Con 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción.

MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.



- Colocar alrededor de la zona lumbar de forma que se abroche por delante.
- La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo.
- Colocar el pulgar izquierdo en la cinta agarradera horizontal pequeña y la mano derecha en la cinta agarradera vertical grande.



- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.



- Ajustar el cinturón con la ayuda de la cinta agarradera, ejerciendo la compresión adecuada, procurando que la faja no presione en exceso.



PRECAUCIONES

- No ajustar en exceso.
- No usar sobre heridas abiertas.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.



CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua fría o templada y jabón neutro. Lavar a una temperatura máxima de 30°C.
- Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana. No secar a máquina.
- No usar lejía.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja.

