

FAJA SACROLUMBAR TRANSPIRABLE VARISPORT

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja de fuerte compresión, con dos bandas elásticas cruzadas en la espalda para sujetar la zona sacro-lumbar. Lleva 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción. Tejido transpirable.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	COLOR	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2242996	-	BEIGE	S	80-100	8426828872797
2242997	381210.8	BEIGE	M	90-110	8426828429977
2242998	381228.3	BEIGE	L	100-120	8426828429984
2242999	-	BEIGE	XL	110-130	8426828872803
2242300	-	BEIGE	XXL	120-140	8426828872810

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para lumbalgias en fase aguda o crónica, ciática, artrosis, sujeción en problemas vertebrales o para una mayor sujeción en trabajos o situaciones que requieran forzar excesivamente la zona lumbar.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido transpirable.
- Composición:
 - 80% Poliamida.
 - 20% Elastano.
- Cierre velcro, garantizado para 2000 usos.
- Sin látex.
- Lleva 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción.
- Color: carne.
- Altura trasera: 25cm.



MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor de la zona lumbar de forma que se abroche por delante.
- La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar el cinturón, ejerciendo la compresión adecuada, procurando que la faja no presione en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua fría o templada y jabón neutro. Lavar a una temperatura máxima de 30°C.
- Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana. No secar a máquina.
- No usar lejía.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.



CE

