

## FONENDO MEDICAL WAITCH NURSE

## DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Dispositivo de una campana para diagnóstico y evaluación física.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	COLOR
6301501	159547.8	NEGRO
6301521	159556.0	AZUL
6301522	159553.9	VERDE
6301523	159554.6	AMARILLO
6301524	159555.3	ROJO
6301527	-	ROSA
6301528	-	GRIS

## CLASIFICACIÓN

Según Reglamento UE 2017/745: Producto Sanitario, de Clase I.

## INDICACIONES

- Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.
- Complemento en la toma de la presión sanguínea.

## CARACTERÍSTICAS

- CAMPANA de una sola cara, ligera, de aluminio.
- TUBO de PVC, flexible, disponible en distintos colores. LIBRE DE LÁTEX.
- OLIVAS de PVC blanco.
- ARCO metálico ajustable.

## MODO DE USO

CAMPANA:

Posicione la campana encima del punto de auscultación.



**AJUSTE DE EL ARCO Y LAS OLIVAS:**

- Compruebe que el arco esté en línea con la anatomía típica del canal auditivo.
- Las olivas deben ir en dirección de atrás hacia delante, cuando las coloque en el oído.
- Para reducir la dureza del arco, coja con ambas manos, por debajo de las olivas y estírelo gradualmente hasta que se haya abierto completamente.
- Para aumentar la dureza del arco, cójalo por donde se junta con el tubo de PVC, con una mano y oprima hasta que los dos tubos del arco se junten. Repita esta presión si es necesario.

**PRECAUCIONES**

- Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas.
- No poner en contacto con aceites o disolventes.
- No sumergir el fonendo en líquidos.
- No esterilizar en autoclave.

**LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN**

- Las olivas se sacan desenroscándolas.
- Para sacar la membrana, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol.
- Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.
- Antes de ensamblar de nuevo las distintas partes séquelas concienzudamente.

**PRESENTACIÓN**

Una unidad en caja de cartón.

**CE**