

FONENDO MEDICAL WATCH TIPO LITT PEDIÁTRICO

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.

REFERENCIA INTERNA	MODELO
6301520	NEGRO

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento UE 2017/745: Producto Sanitario, de Clase I.

INDICACIONES

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. Para uso especial en pediatría.

CARACTERÍSTICAS

- CAMPANA doble, ligera, de aluminio.
- TUBO de PVC, flexible, con arco integrado.
- OLIVAS de PVC blanco.
- ARCO metálico integrado en el tubo.
- COLOR: Negro.

MODO DE USO

- Para baja frecuencia posicione la campana encima el punto de auscultación.
- Para alta frecuencia posicione la membrana sobre el punto de auscultación.
- Repita esta presión si es necesario.

AJUSTE DE EL ARCO Y LAS OLIVAS:

- Compruebe que el arco esté en línea con la anatomía típica del canal auditivo.
- Las olivas deben ir en dirección de atrás hacia delante, cuando las coloque en el oído.
- Para reducir la dureza del arco, coja con ambas manos, por debajo de las olivas y estírelo gradualmente hasta que se haya abierto completamente.
- Para aumentar la dureza del arco, cójalo por donde se junta con el tubo de PVC, con una mano y oprima hasta que los dos tubos del arco se junten. Repita esta presión si es necesario.



PRECAUCIONES

- Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas.
- No poner en contacto con aceites o disolventes.
- No sumergir el fonendo en líquidos.
- No esterilizar en autoclave.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Las olivas se sacan desenroscándolas.
- Para sacar la membrana, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol.
- Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.
- Antes de ensamblar de nuevo las distintas partes séquelas concienzudamente.

PRESENTACIÓN

Una unidad en estuche con cremallera dentro de una caja de cartón.



CE

