

FONENDO MEDICAL WAITCH TIPO LITT**DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Dispositivo de doble campana para diagnóstico y evaluación física.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	COLOR	MODELO
6301503	159546.1	NEGRO	-
6301510	-	NEGRO	CON ESTUCHE
6301516	159552.2	AZUL	-
6301517	159549.2	VERDE	-
6301518	-	AMARILLO	-
6301519	159551.5	ROJO	-
6301529	-	ROSA	-
6301530	159550.8	GRIS	-

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento UE 2017/745: Producto Sanitario, de Clase I.

INDICACIONES

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.

CARACTERÍSTICAS

- CAMPANA doble, ligera de aluminio.
- TUBO de PVC, flexible, disponible en distintos colores.
- OLIVAS de PVC blanco.
- ARCO metálico enfundado en el tubo.
- LIBRE DE LÁTEX

MODO DE USO

CAMPANA:

- Posicione la campana encima del punto de auscultación y presione según la frecuencia deseada.
- Para baja frecuencia posicione la campana encima el punto de auscultación.



- Para alta frecuencia; posicione la membrana sobre el punto de auscultación.
- Para oír por la otra campana, girar el cabezal completo 180°.
- Los complementos adicionales permiten el uso del fonendo en adultos y en pediatría.

AJUSTE DE EL ARCO Y LAS OLIVAS:

- Compruebe que el arco esté en línea con la anatomía típica del canal auditivo.
- Las olivas deben ir en dirección de atrás hacia delante, cuando las coloque en el oído.
- Para reducir la dureza del arco, coja con ambas manos, por debajo de las olivas y estírelo gradualmente hasta que se haya abierto completamente.
- Para aumentar la dureza del arco, cójalo por donde se junta con el tubo de PVC, con una mano y oprima hasta que los dos tubos del arco se junten. Repita esta presión si es necesario.

PRECAUCIONES

- Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas.
- No poner en contacto con aceites o disolventes.
- No sumergir el fonendo en líquidos.
- No esterilizar en autoclave.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Las olivas se sacan desenroscándolas.
- Para sacar la membrana, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol.
- Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.
- Antes de ensamblar de nuevo las distintas partes séquelas concienzudamente.

PRESENTACIÓN

Una unidad en caja de cartón.

**CE**