

## FONENDO MEDICAL WATCH TIPO RAPPAPORT

## DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	COLOR
6301537	159557.7	MORADO
6301538	159557.7	AZUL CIELO
6301539	159557.7	ROSA CLARO
6301540	159548.5	NEGRO
6301541	159557.7	VERDE
6301542	159557.7	FUCSIA
6301543	159557.7	AZULÓN
6301544	159557.7	LILA
6301545	159557.7	CORAL
6301546	159557.7	AZUL RAYAS
6301549	159557.7	ROJO TEJA

## CLASIFICACIÓN

Según Reglamento UE 2017/745: Producto Sanitario, de Clase I.

## INDICACIONES

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. Para uso especial en cardiología.

## CARACTERÍSTICAS

- CAMPANA doble de acero cromado.
- MEMBRANAS transparentes.
- TUBO doble tubo de PVC, flexible, disponible en distintos colores. LIBRE DE LÁTEX.
- OLIVAS de PVC negras.
- ARCO metálico ajustable.
- COMPLEMENTOS, además se adjunta un estuche con 7 repuestos adicionales:
  - 3 gomas quitafíos de distintos tamaños.



- 2 juegos de olivas, unas blandas de silicona y otras duras con forma de champiñón.
- 2 membranas, una de tamaño grande y otra de tamaño pequeño.

## MODO DE USO

### CAMPANA:

- Posicione la campana encima del punto de auscultación y presione según la frecuencia deseada.
- Para oír por la otra campana, girar el cabezal completo 180°.
- Los complementos adicionales permiten el uso del fonendo en adultos y en pediatría.

### AJUSTE DE EL ARCO Y LAS OLIVAS:

- Compruebe que el arco esté en línea con la anatomía típica del canal auditivo.
- Las olivas deben ir en dirección de atrás hacia delante, cuando las coloque en el oído.
- Para reducir la dureza del arco, coja con ambas manos, por debajo de las olivas y estírelo gradualmente hasta que se haya abierto completamente.
- Para aumentar la dureza del arco, cójalo por donde se junta con el tubo de PVC, con una mano y oprima hasta que los dos tubos del arco se junten. Repita esta presión si es necesario.

## PRECAUCIONES

- Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas.
- No poner en contacto con aceites o disolventes.
- No sumergir el fonendo en líquidos.
- No esterilizar en autoclave.

## LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Las olivas se sacan desenroscándolas.
- Para sacar la membrana, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol.
- Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.
- Antes de ensamblar de nuevo las distintas partes séquelas concienzudamente.



## PRESENTACIÓN

Una unidad en caja de cartón.



CE

