

MEDIA CORTA VARISPORT**DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Media corta de compresión fuerte hasta la rodilla de tejido elástico ajustable de compresión decreciente, con tejido tramado y elástica en un solo sentido para mejor adaptación a la pierna, sin costura, talón cerrado y sin puntera.

REFERENCIA INTERNA	TALLA	PERÍMETRO B CM	PERÍMETRO D CM	EAN13
2342021	7	22	34	8426828420219
2342023	9	24	37	8426828420233
2342024	10	26	40	8426828420240
2342026	12	29	45	8426828420264

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Está indicada para:

- Varices sintomáticas.
- Insuficiencia venosa crónica.
- Tromboflebitis.
- Después de la curación de úlceras varicosas importantes.

CARACTERÍSTICAS

- Compresión: 25 (punto D) – 36 (punto B) mmHg/cm²
- Máxima compresión en el tobillo y mínima bajo la rodilla (decreciente).
- Elaborada con poliamida texturada 76%, elastodieno 17% y elastano 7%
- Color beige

MODO DE USO

- Las medias de compresión deben colocarse a primera hora del día nada más levantarse, ya que posteriormente las piernas se van hinchando y ello hace más difícil su colocación.
- Se coloca como una media corta normal.
- El talón ha de quedar bien colocado.



PRECAUCIONES


- No usar sobre heridas abiertas.
- Es extremadamente importante escoger la talla adecuada, y prestar atención a su correcta colocación introduciendo el pie en la media colocando el talón en la parte reforzada y acompañar la media hacia arriba progresivamente, para que la compresión quede convenientemente distribuida.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua templada y con jabón neutro.
- Secar lejos de fuentes de calor. No retorcer.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.

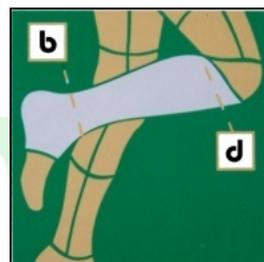

CE

