

## MUÑEQUERA VARISPORT RIZO

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Vendaje elástico para sujetar la muñeca, con cinta elástica incorporada, para una mejor sujeción.  
Medidas: 25x5 cm (largo x alto).

| REFERENCIA INTERNA | TALLA | C.N.     | EAN13         |
|--------------------|-------|----------|---------------|
| 2340108            | ÚNICA | 384420.8 | 8470003844208 |

### CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

### INDICACIONES

Compresión y protección de la muñeca, indicadas para:

- Para el alivio y reducción de lesiones traumáticas leves, de la muñeca, que no precisen inmovilización.
- Para prevenir lesiones en ejercicios físicos, sobre todo en personas propensas a luxaciones o distensiones.
- Tras una inmovilización por lesión.

### CARACTERÍSTICAS

- Composición:
  - Cinta rizo elástica 100% algodón, 30% látex recubierto.
  - Goma: 70% poliéster, 30% de látex recubierto.
  - Cintas de contacto macho y hembra.
- Color azul.

### MODO DE USO

- Introducir la mano en la cinta elástica.
- Colocar la muñequera alrededor de la muñeca.
- Ajustar mediante el cierre velcro.

### PRECAUCIONES

- Contiene látex.



- No usar sobre heridas abiertas.
- Al ajustar a la muñeca no apretar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retírese la faja inmediatamente y consulte con el médico.

### CONSERVACIÓN

- Lavar a mano o a máquina a 30°C como máximo.
- Secar alejada de fuentes de calor.
- No retorcer.
- No usar lejía.

### PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.

**CE**