

## PESARIOS DE SILICONA SUPERFLEMING

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Aro de silicona, de 1 cm. de grosor, de aplicación intravaginal. No contiene látex.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	DIÁMETRO EXTERIOR
3201050	-	50
3201055	150343.5	55
3201060	150344.2	60
3201065	150345.9	65
3201070	150346.6	70
3201075	150347.3	75
3201080	150348.0	80
3201085	150349.7	85
3201090	150350.3	90
3201095	150351.0	95
3201100	150352.7	100

### CLASIFICACIÓN

Según el Real Decreto 1591/2009: Producto sanitario de Clase IIb.

### INDICACIONES

Para la contención del útero en el prolapso uterino e incontinencia urinaria debida al descenso del útero.

### CARACTERÍSTICAS

- Silicona. No contiene látex.
- Incoloro transparente.
- Grosor 1cm
- Diferentes tallas disponibles.

### MODO DE USO

- Sólo puede ser colocado por un médico o personal sanitario competente.
- De uso unipersonal.



- Antes del uso, lavar el pesario con agua templada y jabón neutro. Enjuagar con solución fisiológica.
- No usar cepillos, alcohol, disolventes, ácido u otros líquidos que puedan dañar la superficie del pesario.
- Una vez lavado, no dejarlo desatendido, colocarlo inmediatamente en la vagina.
- El tiempo de utilización del pesario en el paciente, debe ser determinado por el médico.
- Antes de usar el pesario, comprobar que esté intacto y la bolsa que lo contiene, debidamente sellada.
- El pesario no debe presentar variaciones de color, si bien la aparición de un tono blanquecino puede ser debido a los polvos talco utilizados como protección, que se eliminan con el lavado.

### PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No utilizar por un tiempo superior al indicado por el médico.
- No utilizar en combinación con otros dispositivos médicos o como parte de los mismos.
- No utilizar para suministrar medicación.

### CONSERVACIÓN

- Guardar el pesario en su embalaje original, en ambiente seco y alejado de fuentes de calor.
- No colocar peso encima de los pesarios.
- Almacenar alejado de lugares polvorientos y de sustancias nocivas.
- No dejarlo al alcance de los niños.
- No desechar en el ambiente, tirarlo en los contenedores apropiados.
- Se puede autoclavar hasta en dos ciclos consecutivos a 121°C durante 15 minutos.

### PRESENTACIÓN

En bolsa unitaria sellada, dentro de una caja unitaria.



**CE**  
0476

