

## TENSIÓMETRO MEDICAL WATCH ERGONÓMICO DE CUCHARA 5404

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Aparato para la medición de la tensión arterial, manual, de brazo.

REFERENCIA INTERNA	CÓDIGO	MODELO
6380500	5404	AMBIDIESTRO

### CLASIFICACIÓN

Según Real Decreto 1591/2009: Producto Sanitario, de Clase I, con función de medición.

### NORMATIVAS

Norma Europea EN1060.

- Especificaciones para tensiómetros no agresivos.
  - Parte 1 Requisitos generales.
  - Parte 2 Requisitos suplementarios para tensiómetros mecánicos.

### CARACTERÍSTICAS

- Con manómetro para lectura manual.
- Manguito con vejiga de goma, en su interior.
- Manómetro con pera de inflado incorporada. Pera con válvula de desinflado.
- Estuche con cremallera.

### MODO DE USO

- En el momento de realizar una medición, el individuo al cual se le toma la presión debe permanecer tumbado o sentado. Si permanece sentado, habrá de asegurarse de que el manguito, colocado en el antebrazo, quede a la altura del corazón. Se aconseja apoyar el brazo sobre una mesa y no moverlo durante la medición.
- Conecte el tubo del manguito a la válvula de desinflado que está entre el manómetro y la pera.
- Coloque el manguito sobre el antebrazo izquierdo. Pase el extremo con velcro por la barra metálica del otro extremo y ajuste el manguito al brazo, sin apretar. Asegúrese de que la



- flecha indicadora, que se encuentra en la parte exterior del manguito, quede sobre la arteria.
- Coloque el disco del fonendo (no incluido) bajo el borde del manguito, donde indica la flecha.
  - Mientras sujeta la pera, gire el botón de la válvula de desinflado en el sentido de las agujas del reloj y bombee la pera hasta que la aguja marque 40 puntos por encima de la medida de presión máxima habitual.
  - Desinfe el manguito, haciendo girar el botón de la válvula de desinflado, en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  - Cuando oiga el primer latido, tome nota del valor que marca el manómetro, ésta es la presión máxima (sistólica).
  - Continúe desinflando el manguito, irá oyendo los latidos. En el momento en que deje de oír los latidos, anote el valor que marca la aguja del manómetro, esta medida es la presión mínima (presión diastólica).
  - Desinfe el manguito completamente para guardarlo.

### PRECAUCIONES

- Maneje el tensiómetro con cuidado.
- No desmonte ni manipule indebidamente el equipo.
- Guarde el tensiómetro en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Le sugerimos que haga revisar el equipo cada 2 años.
- En caso de que se rompa algún accesorio, sólo se pueden substituir por piezas originales.

### CONSERVACIÓN

- El manguito puede limpiarse con un algodón mojado en alcohol, secándolo bien, seguidamente.
- Guardar en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIÓN

Una unidad en estuche y caja de cartón.



CE  
0123

